



FICHA TÉCNICA

# DETERGENTE ENZIMÁTICO

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Es un detergente no iónico concentrado de bajo poder espumoso y de rápida respuesta para la limpieza efectiva de materiales quirúrgicos. La acción enzimática permite el logro de una limpieza profunda en especial para remover material orgánico de origen humano. No posee acción corrosiva sobre ópticas, instrumental de cirugías endoscópicas ( metales y plásticos), es capaz de saponificar las grasas, sulfatar, dispersar y suspender la suciedad así como disolver y degradar cualquier materia orgánica, aun en lugares de difícil acceso.

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Limpieza profunda
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Acción Rápida

## APLICACIONES

El detergente enzimático NEO está especialmente formulado para la limpieza del material quirúrgico, de vidrio, instrumental médico, endoscopios y equipos en general.

## INSTRUCCIONES DE USO

Realizar la dilución necesaria para la limpieza del material según le grado de suciedad, recomienda una dilución de 1:5 para acción moderada y 1:1 para una acción agresiva. Aplicar directamente sobre el material sumergiendo este completamente en la solución y dejar actuar por 5 min. Hacer uso de material de limpieza neutro para la limpieza mecánica como un cepillo de cerdas no metálicas, y luego enjuagar con abundante agua destilada. Repetir el proceso de ser necesario.



## CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Estado:	Líquido
Color:	Cristalino rojizo
Aroma:	Característico
pH:	Neutro
Presentaciones:	5 Litros
Dilución máxima	1:5

## ATENCIÓN

Una vez utilizado el producto no devolver al envase. Mantener cerrado para evitar su contaminación. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua, en caso de usar lentes de contacto, removerlos y seguir enjuagando con agua, si las molestias persisten, consulte a su doctor. En caso de Ingestión Ingerir abundante agua, si las molestias persisten, consulte a su doctor.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**IMPORTANTE:** Se recomienda no superar los 30 días una vez diluido el producto.

